



FICHE TECHNIQUE TURTLEBRACE DE POIGNET

Orthèse d'immobilisation pour le poignet à base de thermoplastique, moulable directement sur la personne.

PRODUIT

Orthèse de type « appliquer et oublier » fabriquée à partir d'un stratifié de thermoplastique basse température, multi perforé et de tissu microfibre.

La grande souplesse des composantes permet de stabiliser un segment plus facilement et de façon plus précise qu'une orthèse traditionnelle ou qu'une immobilisation plâtrée.

Peut-être remoulé plusieurs fois, sans perdre ses qualités; ce qui permet des ajustements en fonction des pertes d'œdème ou des changements morphologiques.

CARACTERISTIQUES

- Moulée directement sur le segment
- Tissu antibactérien
- Choix de fermeture Velcro ou fermeture éclair
- Ambidextre
- Radio transparent
- Résistant à l'eau
- Possibilité de remoulage illimitée
- 3,2 mm d'épaisseur pour faciliter l'habillement
- Compostable après utilisation



INDICATIONS

- Fracture stable
- Entorse
- Immobilisation postopératoire
- Tunnel carpien
- Tendinite
- Protocole d'immobilisation en série
- Contrôle de la spasticité
- Neuropathie du poignet et de la main

MODÈLES / GRANDEURS

	Pédiatrique	
	Velcro	Fermeture éclair
Moyen (10.4 cm – 16.6 cm)	TBPPV-02	TBPPZ-02
Large (12.8 cm – 20.5 cm)	TBPPV-03	TBPPZ-03
	Adulte	
	Velcro	Fermeture éclair
Petit (15.2 cm – 24.3cm)	TBPAV-01	TBPAZ-01
Moyen (17.6 cm – 28.2 cm)	TBPAV-02	TBPAZ-02
Large (20 cm – 32 cm)	TBPAV-03	TBPAZ-03



INSTRUCTIONS DE MOULAGE

- 1- Chauffez l'orthèse à la chaleur sèche ou humide, entre 67°C et 95 °C (152°F et 200°F), pour qu'elle devienne malléable
 - Méthode chaleur sèche
Mettre l'orthèse dans le sac chauffant Turtlebrace, dans un four conventionnel ou à convection environ 5 minutes.
 - Méthode chaleur humide
Mettre l'orthèse dans un bac d'eau chaude de 3 à 5 minutes.
- 2- Une fois l'orthèse souple et malléable, vous pouvez mouler l'orthèse sur la personne. Assurez-vous que la température de l'orthèse ne risque pas de brûler la personne.
- 3- Placez la personne dans la position désirée et attendre que l'orthèse durcisse.

Une fois durcie, l'orthèse gardera sa forme jusqu'à ce qu'elle soit chauffée à nouveau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mouler l'orthèse trop chaude sur la peau pour éviter les brûlures et les inconforts.
- Ne pas chauffer à plus de 100 °C afin de ne pas endommager l'orthèse.
- Si vous utilisez un pistolet à air chaud, faites attention de ne pas brûler le tissu.

Balthazard
DISTRIBUTION INC.